

Liebe Anwenderin, lieber Anwender, mit Lac[®]-Ophtal[®] MP haben Sie sich für ein Produkt entschieden, das Ihre Augenoberfläche befeuchtet, angenehm erfrischt und beruhigt. Somit werden die subjektiven Anzeichen einer Benetzungsstörung lang anhaltend gelindert.

Lac[®]-Ophtal[®] MP eignet sich zur Befeuchtung und Erfrischung des Auges sowie zur Benetzung und Nachbenetzung harter Kontaktlinsen.

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig – sie enthält wichtige Informationen zur Anwendung von Lac[®]-Ophtal[®] MP. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Apotheker, Ihren Arzt oder gern auch an uns.

Dr. Winzer wünscht Ihnen und Ihren Augen alles Gute!

Inhaltsstoffe:

Jede 10 ml Flasche enthält 2% Povidon, Natriumchlorid, Natriumhydroxid-Lösung, Borsäure, Wasser und ist mit Cetrimid konserviert.

Wann sollten Sie Lac[®]-Ophtal[®] MP benutzen?

Lac[®]-Ophtal[®] MP erfrischt und beruhigt die Augen. Es verbessert die Befeuchtung der Augenoberfläche bei Trockenheitsgefühl, Brennen oder Müdigkeit der Augen, verursacht z. B. durch langes Fernsehen oder Bildschirmarbeit, Heizungsluft oder Klimaanlage. Lac[®]-Ophtal[®] MP ist auch für die Nachbenetzung während des Tragens von harten Kontaktlinsen gut geeignet.

Wie wenden Sie Lac[®]-Ophtal[®] MP an?

Je nach Bedarf tropfen Sie 1-2 Tropfen in jedes Auge. Lac[®]-Ophtal[®] MP ist täglich beliebig häufig anwendbar. Es wird empfohlen, sich vor der Anwendung von Augentropfen die Hände zu waschen.

Für Kontaktlinsenträger: Zur Nachbenetzung 1-2 Tropfen Lac[®]-Ophtal[®] MP in das Auge eintropfen. Harte Kontaktlinsen können bei der Anwendung der Augentropfen im Auge bleiben, weiche Kontaktlinsen können 15 min später wieder eingesetzt werden.

Es wird empfohlen nach dem Eintropfen mehrmals zu blinzeln, dadurch kann sich der Tropfen optimal auf der Augenoberfläche verteilen. Die einfache und problemlose Anwendung entnehmen Sie bitte der Abbildung.

Flasche beim Tropfen senkrecht über das Auge halten und eine Berührung mit dem Auge vermeiden.



Gegenanzeigen:

Bitte benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie auf einen der Inhaltsstoffe überempfindlich reagieren.

Vorsichtsmaßnahmen:

- Beim Auftreten von Reizungen und Unverträglichkeiten das Produkt nicht mehr anwenden.
- Weiche Kontaktlinsen herausnehmen und ca. 15 min. später wieder einsetzen.
- Um Verunreinigungen zu vermeiden, sollten Sie die Tropferspitze nicht berühren und direkten Kontakt mit dem Auge und der Kontaktlinse vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht länger als 6 Wochen nach Anbruch.
- Bei Anwendung unterschiedlicher Präparate am Auge sollten diese in einem Abstand von ca. 15 min. getropft werden.
- Überprüfen Sie vor der ersten Anwendung den Inhalt der Verpackung. Verwenden Sie keine bereits geöffneten oder beschädigten Flaschen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr nach Ablauf des Verwendbarkeitsdatums.
- Verschließen Sie die Flasche nach Gebrauch.
- Jede Flasche sollte immer nur ein Anwender verwenden.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Nur zur Anwendung am Auge.

Warnhinweise:

Es ist wichtig, dass Sie die Hinweise in dieser Gebrauchsanweisung für eine richtige Anwendung der Augentropfen beachten.

Weiter bestehende oder zusätzlich auftretende Augenprobleme sollten medizinisch abgeklärt werden. Wenn das Auge schmerzt, entzündet und gerötet ist, entfernen Sie Ihre Kontaktlinsen und suchen Sie einen Arzt auf.

Welche Packungen sind erhältlich?

Lac[®]-Ophtal[®] MP gibt es in Packungen mit 10 ml und 3 x 10 ml Augentropfen.

..... ✂
Anzeige

ANFORDERUNGSCOUPON

Fax: 030 – 33 0 93 – 305

Liebe Anwenderin, lieber Anwender, mit diesem Anforderungscoupon können Sie sich gern kostenlos unsere **mehrsprachige** Informationsbroschüre zum Thema „Trockenes Auge“ bestellen. Darin enthalten sind Informationen und Tipps in **deutscher, englischer, italienischer** und **türkischer, arabischer** als auch **russischer** Sprache.

Senden Sie uns einfach Ihre Adresse per Post, Fax oder E-Mail oder rufen Sie an und Sie erhalten umgehend Ihre Broschüre.

Dr. Winzer Pharma

Service „Trockenes Auge“
Brunsbütteler Damm 165-173
13581 Berlin

Tel.: 030 – 33093 – 5070

Fax: 030 – 33093 – 305

E-Mail: service@drwinzer.de

Bitte senden Sie die Broschüre an folgende Adresse:



Dr. Robert Winzer Pharma GmbH,
 Brunsbütteler Damm 165-173, D-13581 Berlin
 Tel: 030 – 330 93 – 5070,
 Fax: 030 – 330 93 – 305,
 E-Mail: service@drwinzer.de



Sterilisationsverfahren, Aseptisch



Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden.



Nach Anbruch 6 Wochen (1,5 Monate) anwendbar.



Gebrauchsanweisung beachten!



Verwendbar bis:



Chargenbezeichnung

Lac®-Ophtal® MP, 2009-05

83842 PB 259/1/CE

Anzeige

Weitere Informationen zu Lac®-Ophtal® MP

Welche Bedeutung hat die Tränenflüssigkeit?

Die natürliche Tränenflüssigkeit wird mit jedem Lidschlag auf der Augenoberfläche verteilt, um dort das Auge vor dem Austrocknen zu schützen, bei der Heilung von oberflächlichen Verletzungen der Hornhaut zu helfen und Hornhautschäden vorzubeugen. Eine gestörte Tränenproduktion äußert sich durch unterschiedliche Beschwerden, wie z. B. Trockenheitsgefühl, Brennen oder ein Fremdkörpergefühl im Auge, gereizte und gerötete Augen, verklebte Augen am Morgen und in manchen Fällen auch tränende Augen.

Wie kann Lac®-Ophtal® MP Ihren Augen helfen?

Lac®-Ophtal® MP verbessert die Stabilität des Tränenfilms. Ihre Augen sind für eine längere Zeit mit wohltuender Feuchtigkeit versorgt, werden erfrischt und strahlen einen gesunden Glanz aus. Lac®-Ophtal® MP ist ein glasklarer Tropfen, der eine sofortige klare Sicht ohne Schlieren ermöglicht.

Und das können Sie persönlich tun:

- Lüften Sie mehrmals täglich gründlich.
- Trinken Sie ausreichend (mind. 2 Liter täglich).
- Halten Sie sich häufig an frischer Luft auf.
- Richten Sie Gebläse, bspw. im Auto, nicht auf die Augen.
- Legen Sie Pausen bei der Bildschirmarbeit ein.

Lac®-Ophtal®		ohne Konservierungsstoffe
Lac®-Ophtal® system mit 2% Povidon	Angenehme Erfrischung und Befeuchtung bei leichtem, gelegentlich auftretendem Trockenheitsgefühl	<input checked="" type="checkbox"/> innovatives Tropfsystem <input checked="" type="checkbox"/> 12 Wochen nach Anbruch haltbar
Lac®-Ophtal® MP sine mit 2% Povidon		<input checked="" type="checkbox"/> Einzeldosisbehältnis <input checked="" type="checkbox"/> praktisch für unterwegs
Lac®-Ophtal® MP mit 2% Povidon		<input type="checkbox"/> Standard-Tropfflasche
Lac®-Ophtal® Gel sine mit 0,2% Carbomer	Langanhaltende intensive Befeuchtung bei starkem Trockenheitsgefühl – auch ideal für die Anwendung über Nacht	<input checked="" type="checkbox"/> Einzeldosisbehältnis <input checked="" type="checkbox"/> praktisch für unterwegs
Lac®-Ophtal® Gel mit 0,2% Carbomer		<input type="checkbox"/> Standard-Tropfflasche

Anzeige

Ihre Meinung ist uns wichtig!

1. Wie sind Sie auf Lac®-Ophtal® MP aufmerksam geworden?

- Empfehlung des Arztes, Fachrichtung: _____
- Empfehlung des Apothekers Empfehlung von Verwandten oder Bekannten
- Werbung Sonstiges: _____

2. Aus welchem Grund wenden Sie Lac®-Ophtal® MP an?

- Zur Linderung gereizter Augen Zur Befeuchtung der Augen
- Anderer Grund: _____

3. Wie beurteilen Sie Lac®-Ophtal® MP hinsichtlich folgender Punkte?

- Beruhigung der Augen: sehr gut gut weniger gut schlecht
- Befeuchtung der Augen: sehr gut gut weniger gut schlecht
- Verträglichkeit: sehr gut gut weniger gut schlecht

4. Falls Sie Kinder haben, nutzen Sie Lac®-Ophtal® MP auch für diese?

- ja, Alter der Kinder _____ nein

5. Soziodemographische Angaben für statistische Zwecke:

Geschlecht: weiblich männlich Alter: _____

Ja, ich gebe meine Einwilligung, dass meine Daten bei Dr. Robert Winzer Pharma GmbH gespeichert werden. Die Daten werden ausschließlich anonymisiert gespeichert und nicht an Dritte weitergegeben. Diese Einwilligung kann ich jederzeit schriftlich widerrufen.

Datum: Unterschrift: