



PZN - 01881095

# Reparil® Ice-Spray Madaus

## Gebrauchsinformation

**Zusammensetzung:** Butan, Pentan, Isobutan, Propan, Isopropylalkohol, Menthol, Campher. Mit angenehmer frischer Duftnote.

**Hinweis:** Reparil® Ice-Spray Madaus enthält keine künstlichen Duft- und Aromastoffe.

**Anwendungsgebiete:** Für die zuverlässige Kühlung bei Prellungen, Zerrungen, Muskelkrämpfen und Blutergüssen. Reparil® Ice-Spray Madaus ist als erste Hilfe besonders für geschlossene Sportverletzungen geeignet. Nicht auf Schleimhäuten und offenen Wunden verwenden. Reparil® Ice-Spray Madaus sollte nicht in Kontakt mit den Augen gelangen.

**Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:** Reparil® Ice-Spray Madaus auf die betroffenen Hautflächen aus mindestens 15 cm Entfernung aufsprühen. Bei Bedarf kann Reparil® Ice-Spray Madaus mehrfach angewandt werden. Höchstens 5 Sekunden lang auf eine Stelle sprühen (Gefahr von Erfrierungen). Nicht anwenden bei Säuglingen und Kleinkindern unter 6 Jahren.

**Hinweis zur Anwendung:** Um eine einwandfreie Qualität des Produktes und die Funktion dieses Applikationssystems zu gewährleisten, darf an der Sprayflasche keine Manipulation vorgenommen werden.

**Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Medizinproduktes:** Reparil® Ice-Spray Madaus darf nur bis zu dem auf dem Behältnis mit „verwendbar bis“ bezeichneten Datum verwendet werden.

Reparil® Ice-Spray Madaus wird ohne Konservierungsmittel hergestellt und keimfrei in das Behältnis mit einem speziellen Applikationssystem abgefüllt. Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch ist daher eine Konservierung nicht erforderlich.

Stand der Information: September 2015

Vertrieb:  
MEDA Pharma GmbH & Co. KG  
Benzstraße 1, 61352 Bad Homburg

CE 0297

Hersteller:  
MADAUS GmbH, Colonia-Allee 15, 51067 Köln

LOT s. Bodenaufdruck 3 270

Mindestens verwendbar bis : s. Bodenaufdruck

M.-Nr.: 55DE05139952-00



Ohne künstliche Duft- und Aromastoffe

Behälter steht unter Druck. Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50° C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

**MEDA**  
Medizinprodukt  
200 ml Lösung zum Aufsprühen auf die Haut



Hochdruckgas