

ANDRYLL

Silver Gel



BEHANDLUNG ZUR BESEITIGUNG DES PING-PONG EFFEKTES BEI VAGINALEN INFEKTIONEN

Medizinprodukt, PZN 16624004. Rezeptfrei.

ANDRYLL Silver Gel

Creme-Gel - 25 ml Tube

Das Medizinprodukt **ANDRYLL Silver Gel** ist ein Adjuvans bei der lokalen Behandlung von Virus-, Pilz- und Bakterienerkrankungen und unterstützt den natürlichen Heilungsprozess nicht komplizierter post-operativer Läsionen im Bereich Urologie - Andrologie.

Verwendungszweck: **ANDRYLL Silver Gel** ist ein Medizinprodukt, welches unterstützend bei der natürlichen Heilung nicht komplizierter postoperativer Läsionen und bei der Behandlung von Virus-, Pilz- und Bakterieninfektionen angezeigt ist. Es ist ein Creme-Gel aus TIAB® (einem Komplex aus mikrokristallinem Titandioxid mit kovalent gebundenen einwertigen Silberionen), Natriumhyaluronat und Aloe Vera.

ANDRYLL Silver Gel bildet eine Schutzbarriere für die chirurgische Läsion, um Gewebe gegen pathogene Noxen zu isolieren und zu schützen. Dank seiner Eigenschaften und der zusätzlichen Wirkung seiner Bestandteile wirkt **ANDRYLL Silver Gel** auch feuchtigkeitsspendend und beruhigend, isoliert den Angriffspunkt der äußeren mikrobiellen Einflüsse (Barrierewirkung), begrenzt so die mikrobielle Besiedlung am Angriffs- und Entstehungsort und begünstigt die Bedingungen im Mikromilieu der Wunde für die natürliche Regeneration des Gewebes.

Aufgrund seiner Eigenschaften wird **ANDRYLL Silver Gel** verwendet als:

- Adjuvans im natürlichen Heilungsprozess nicht komplizierter postoperativer Läsionen im urologischen und andrologischen Bereich (Beschneidung, Varikozelektomie, Hydrozelektomie, plastische Chirurgie des Frenulums, Orchidopexie, plastische Chirurgie der Vorhaut);
- Adjuvans bei der örtlichen Behandlung von Erkrankungen viraler, mykotischer und bakterieller Ätiologie.

Gebrauchsanweisung: Das Medizinprodukt **ANDRYLL Silver Gel** ist wie folgt im Genitalbereich anzuwenden: 1. Reinigen Sie den zu behandelnden Bereich vor dem Gebrauch und trocknen Sie ihn sorgfältig ab. 2. Tragen Sie eine dünne Schicht Creme-Gel auf die betroffene Stelle auf. 3. Nicht einmassieren. 4. Wiederholen Sie die Anwendung zweimal täglich.

Warnungen: Verwenden Sie das Produkt nicht für Indikationen, die von den in der Packungsbeilage angegebenen abweichen. Waschen Sie Ihre Hände sorgfältig, bevor Sie jedes Medizinprodukt anwenden. Nach dem Auftragen reiben Sie das Produkt nicht auf der betroffenen Stelle ein, sondern

lassen es auf natürliche Weise trocknen, das Creme-Gel muss eine Schutzfilmschicht bilden. Vermeiden Sie den Kontakt mit den Augen. Bei Kontakt mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen. Verwenden Sie das Produkt nicht nach dem auf der Verpackung angegebenen Verfallsdatum. Bei Raumtemperatur lagern, von Wärmequellen fernhalten. Nicht einfrieren. Von Kindern fernhalten. Lokale Anwendung - nicht innerlich anwenden. Nicht verwenden, wenn die Verpackung offen oder beschädigt ist. Nicht sterilisieren. Verschließen Sie die Tube nach Gebrauch ordnungsgemäß. Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber den Komponenten. Unterbrechen Sie die Behandlung bei anormalen Hautreaktionen. Bei langfristigem Gebrauch konsultieren Sie Ihren Arzt. Das Produkt ist kein Spermizid oder Verhütungsmittel.

Kontraindikationen: Überdosierungsphänomene sind nicht bekannt. Bekannte Überempfindlichkeit gegenüber den Bestandteilen. Wechselwirkungen mit anderen Medizinprodukten oder anderen Arzneimitteln sind nicht bekannt.

Inhaltsstoffe: Aqua, PPG-15-Stearylether, Steareth-2, Stearinsäure, Glycerin, TIAB® (mikrokristallines Titandioxid mit kovalent gebundenen einwertigen Silberionen), Cetearylalkohol, Dimethicon, Steareth-21, Aloe-Barbadensis-Extrakt, Ethylhexylglycerin, Natriumhyaluronat, Tocopherylacetat, Benzalkoniumchloride, Hexamidindiiethionat, Dinatrium-EDTA, Natriumhydroxid.

Aufbewahrungshinweise: Von Feuchtigkeit und Wärmequellen fernhalten. Wenn das Produkt direktem Sonnenlicht ausgesetzt wird, kann es eine leichte gelbliche Färbung annehmen, dies beeinträchtigt jedoch nicht seine Funktionseigenschaften oder seine Haltbarkeit.

Verpackung: 25 ml Tube.

Hersteller: NTC s.r.l., Via Luigi Razza 3, 20124 Mailand, Italien

Vertrieb: HEATON k.s., Na Pankráci 332/14, 140 00 Prag 4, Tschechische Republik

Datum der Revision des Textes: 10/2019